

# Mode d'emploi de la Joëlette

## *Technique d'utilisation de la Joëlette*

### -1-Dépliage : mise en service de la Joëlette sur un sol stable

1. Mettre en place les deux béquilles arrière et la béquille avant.
2. Déplier les bras arrière.
3. Replier les bras avant, repose-pieds, appuie-tête, coussins.

### -2-Installation du Voyageur

1. L'un des accoudoirs peut-être replié (un papillon à enlever). Le ou les bras avant peuvent être enlevé.
2. Le passager étant assis, régler les repose-pieds, appuie-tête, mettre la ceinture, les brancards avant avec les goupilles.
3. Surveiller toujours l'appareil, car les béquilles peuvent s'enfoncer dans un sol mou.

### -3-Mise en route

Les deux Pilotes et co-pilotes sont à leur place. Deux accompagnateurs supplémentaires sont présents pour :



- Enlever la béquille avant et la replacer à l'envers dans son logement.
  - Puis, enlever et replacer à l'envers les béquilles arrière l'une après l'autre en penchant légèrement l'appareil vers l'avant et à droite et gauche.
  - NB : A l'arrêt, pour remettre les béquilles : Commencer toujours par les béquilles à l'arrière, puis celle de l'avant.
2. Le Pilote arrière règle la hauteur des brancards arrière pour être en bonne position.
    - Le siège doit être à peu près horizontal, légèrement basculé vers l'arrière.

Le poids doit être supporté par la roue, pas par les pilotes. Voir le point NB au paragraphe « CONFORT »

- **Circulation :**  
Avoir toujours en tête les deux points essentiels: sécurité – confort tout en se posant des questions : **et si j'étais à la place du Voyageur !**
- Demander à votre Voyageur ce qu'il ressent, ou vérifier le visuellement, de par son comportement. **Adaptez-vous à lui, et pas l'inverse.**

#### 1. **SÉCURITÉ**

- Il s'agit d'une équipe de cinq membres: il faut donc communiquer.
- Ensuite, ne pas aller trop vite, il faut savoir où passe la roue et où on met les pieds.
- Conserver, en permanence l'équilibre et la position du siège quelque soit la pente ou l'état du terrain en réglant la hauteur des bras arrière:  
monter les poignées pour les descentes, les baisser pour les côtes.
- La roue doit porter l'ensemble au maximum; même si le terrain est en dévers latéral, l'adhérence reste la même. Plus on s'écarte du point d'équilibre, plus les pilotes sont obligés de porter l'ensemble. Ne jamais pencher vers l'aval (face ou profil).

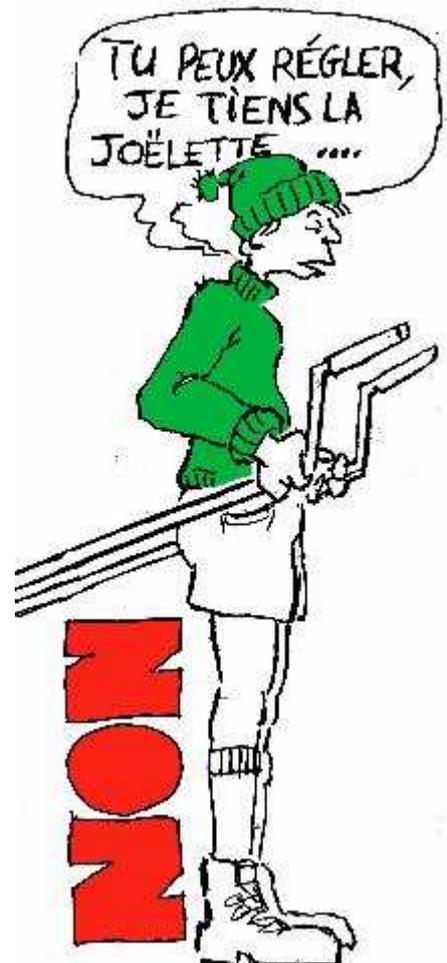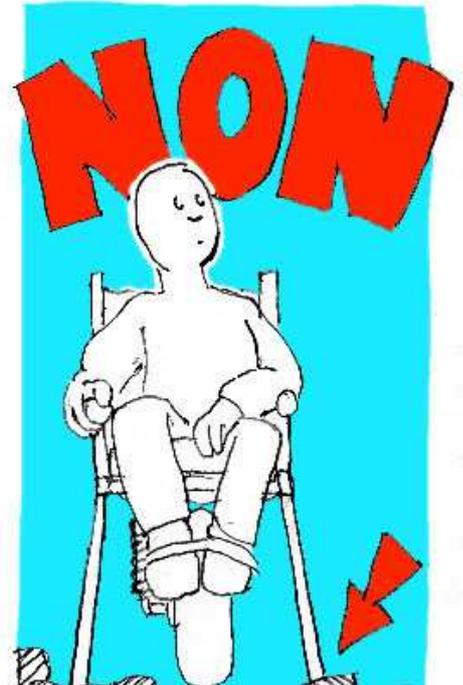

## 2. CONFORT

- Régler toujours les bras arrières pour conserver le siège horizontal et pour que le pilote arrière soit en position favorable pour maintenir l'ensemble.
- Éviter les montées raides, choisir plutôt des virages en Z.
- Veiller à ne pas accrocher les repose-pieds qui sont relativement fragiles.
- **NB : Le pilote arrière appuie légèrement sur les brancards. Le but recherché est de soulager le poids des bras avant sur les épaules du co-pilote : Ce dernier doit ressentir qu'il ne tient « rien » Pour cela il a l'obligation de communiquer avec le pilote arrière, pour que ce dernier appuie plus ou moins.**

Toujours utiliser le frein dans les descentes, ne pas retenir de l'avant (risque de déséquilibrer l'appareil, et donc de faire forcer l'accompagnateur arrière).

### -D- Complément d'informations : Efforts pour le déplacement :

- *Sur terrain plat*, l'effort est minime si l'équilibre est maintenu.
- *Dans les montées*, c'est l'accompagnateur avant qui doit tirer sans accélérer, en dirigeant la Joëlette pour éviter les obstacles et trouver la meilleure ligne de pente.  
A l'arrière, il faut toujours tenir l'équilibre et, si besoin, pousser aussi en faisant un effort dirigé vers la roue (entre l'axe et le point d'appui du sol).  
Pour faire des virages à 180° il est préférable de les exécuter sur place en pivotant sur la roue et en sachant que la longueur de l'appareil déporte l'accompagnateur arrière.
- *Dans les descentes*, le ralentissement est obtenu par le frein et par lui seul, sans que les accompagnateurs n'aient à retenir; ils conservent alors plus d'équilibre et d'autonomie pour ne pas glisser.

